



## Cuidados y storage de su VetCorder™ Clásico

Al igual que con todos los equipos, el cuidado y el mantenimiento adecuados con el VetCorder™ Clásico prolongarán la vida útil de la unidad. En este segmento, compartiremos algunos consejos sobre el cuidado y el almacenamiento.



## LIMPIEZA DE TU CLÁSICO

### QUÉ HACER

- ✓ Limpie el dispositivo con un paño limpio y seco
- ✓ Use un poco de alcohol en un paño suave
- ✓ Retire suavemente los clips de ECG para su limpieza
- ✓ Limpie los botones de ECG con un hisopo de algodón

### NO

- ✗ Sumerge tu VetCorder en líquido
- ✗ Rocíe CUALQUIER COSA en su dispositivo
- ✗ Suelta o lanza el VetCorder Clásico
- ✗ Ponga tensión en el adaptador o los cables

## ALMACENAMIENTO DE SU CLÁSICO

### QUÉ HACER

- ✓ Retire los cables por la base de los conectores
- ✓ Retire los clips de los pacientes pellizcando el clips para abrir y quitar
- ✓ Guarde los cables LOSELY en una bolsa o en una bandeja
- ✓ Deje los sensores conectados al adaptador
- ✓ Desenchufe el adaptador tirando hacia afuera

### NO

- ✗ Mover o girar los cables
- ✗ Tirar de cables para quitar de los pacientes
- ✗ Envolver o colgar cables para el almacenamiento



¡Contáctenos al **844-VETCORDER** o envíenos un correo electrónico a [info@sentierconnect.com](mailto:info@sentierconnect.com) si tiene ALGUNA PREGUNTA sobre cómo cuidar y almacenar adecuadamente