



Cuidados y storage de su Vetcorder™ Pro

Al igual que con todos los equipos, el cuidado adecuado y el mantenimiento con el Vetcorder™ Pro prolongará la vida útil de la unidad. En este segmento, compartiremos algunos consejos sobre el cuidado y el almacenamiento.



LIMPIEZA DE SU PROFESIONAL

QUÉ HACER

- ✓ Limpie el dispositivo con un paño limpio y seco
- ✓ Use un poco de alcohol en un paño suave
- ✓ Retire suavemente los clips de ECG para su limpieza
- ✓ Limpie los botones de ECG con un hisopo de algodón

NO

- ✗ Sumerge tu Vetcorder Pro en líquido
- ✗ Rocíe CUALQUIER COSA en su dispositivo
- ✗ Retire el estuche con frecuencia
- ✗ Deja caer o tira el Vetcorder

ALMACENAMIENTO DE SU PRO

QUÉ HACER

- ✓ Retire los cables por la base de los conectores
- ✓ Retire los clips de los pacientes pellizcando los clips para abrir y quitar
- ✓ Guarde los cables flojamente en una bolsa o en una bandeja

NO

- ✗ Mover o girar los cables
- ✗ Tirar de cables para quitar de los pacientes
- ✗ Envolver cables para almacenamiento



¡Contáctenos al **844-VETCORDER** o envíenos un correo electrónico a info@sentierconnect.com si tiene ALGUNA PREGUNTA sobre cómo cuidar y almacenar adecuadamente su Vetcorder Pro.